
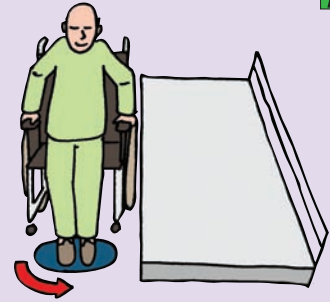


## Van zit naar zit met behulp van draaischijf/beugel via stand

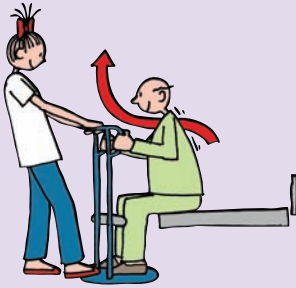

De cliënt moet voor deze techniek geheel zelf rechtop kunnen gaan zitten en ook over voldoende coördinatie daarvoor beschikken! Het hulpmiddel helpt door iets steun en stabiliteit te geven en door te helpen met het verplaatsen van de voeten.

Plaats het hulpmiddel op de juiste plek. Dit luistert vrij nauw: te ver naar voren maakt het erg zwaar voor de cliënt, te ver naar achteren maakt hem instabiel.

Zet het bed liefst iets hoger dan de rolstoel: dan beweegt de cliënt met de zwaartekracht mee. De client steunt op het matras, drukt zich op en gaat staan. Je kunt de cliënt nu naar de rolstoel draaien.

De cliënt gaat weer zitten. Vraag eerst of hij de zitting tegen zijn benen voelt. Vraag de cliënt de romp voorover te buigen ('neus naar de knieën'), anders zou hij achterover vallen. Zorg dat de cliënt steun neemt op de zijleuningen van de stoel en vervolgens rustig gaat zitten. Haal dan het hulpmiddel weg.



Dit document is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de schrijvers, noch de uitgever stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze uitgave. Oriëntatie op de informatie in deze uitgave zal altijd de officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie in deze uitgave.

- Zorg dat je goed getraind bent, gebruik een goed handboek, bekijk de filmpjes op [www.goedgebruik.nl](http://www.goedgebruik.nl) en oefen!
- Volg altijd de gebruiksaanwijzing van een hulpmiddel en hou die bij de hand.
- Leg afspraken vast op een transferprotocol en werk met goed onderhouden hulpmiddelen.