

De keuze van de tilband/tilsling



De tilband moet passen bij de gekozen lift. Bij een actieve lift (linker plaatje) hoort een andere tilband dan bij een passieve tillift (rechter plaatje).




Bij de actieve lift wordt gebruik gemaakt van een rugband, deze gaat achter de romp langs. Soms is dit een band die aan de voorkant van de romp weer sluit waardoor de cliënt minder snel uit de lift kan vallen.

Bij de passieve lift kan je kiezen voor verschillende modellen en materialen.

Bij de keuze voor de tilsling moet je rekening houden met de mogelijkheden van de cliënt, b.v. bij:

- amputatie van een bovenbeen: amputatiesling;
- noodzaak van hoofdondersteuning: tilsling met hoofdsteun;
- zware, vast in de stoel zittende cliënt met weinig ruimte voor het aanleggen van de sling: sling van gladde stof; en de uit te voeren activiteit, b.v.:
- gewone verplaatsing: gewone tilsling of nettisling;
- toiletgang: toiletsling.

- Zorg dat je goed getraind bent, gebruik een goed handboek, bekijk de filmpjes op www.goedgebruik.nl en oefen!
- Volg altijd de gebruiksaanwijzing van een hulpmiddel en hou die bij de hand.
- Leg afspraken vast op een transferprotocol en werk met goed onderhouden hulpmiddelen.

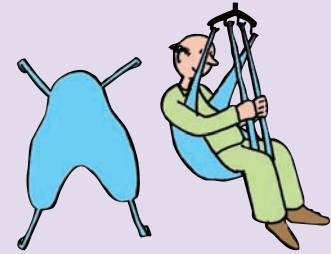

Maak een keuze voor de maat van de tilsling (meer van belang bij de passieve dan bij de actieve tillift) door rekening te houden met:

- de breedte van de schouders van de cliënt;
- de afstand van hoofd/nek tot de stuit.



Let op: het gewicht van de cliënt is niet bepalend voor de maat van de te kiezen tilsling! Meestal zijn de vorm en maat van de cliënt bepalender.



Disclaimer: Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de schrijvers, noch de uitgever stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze uitgave. Oriëntants de informatie in deze uitgave zal altijd de officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie in deze uitgave.