




Van de grond tillen met tilstoel

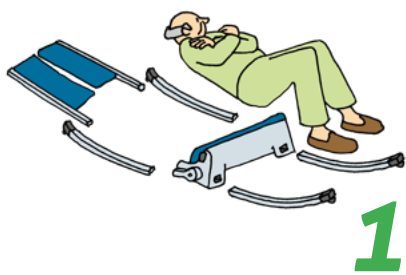

1

! LET OP Controleer eerst of de cliënt niet verwond is, stel hem gerust en doe eventueel een kussen onder zijn hoofd. De tilstoel is een accu aangedreven hulpmiddel om een gevallen cliënt tot zit te brengen.

TIP In principe is de tilstoel voor Mobiliteitsklassen B, C en D. Maar omdat je na een val niet altijd goed kunt inschatten wat iemand wel en niet kan, zou je de tilstoel voor de zekerheid ook bij A kunnen inzetten.



2

Zorg dat de cliënt op zijn rug ligt en de knieën gebogen zijn. Schuif de zitting (de motor) voorzichtig onder de bovenbenen. Vraag de cliënt de armen voor de borst te kruisen. Bevestig nu de beide rugdelen. Vraag daarvoor de cliënt de romp ietsje te draaien door naar de tegenovergestelde kant te kijken. Als een rugdeel goed zit, hoor je een geluidssignaal. Maak de veiligheidsriem vast. Klik nu de vier identieke poten op hun plek. Als je een dubbel geluidssignaal hoort is de tilstoel klaar voor gebruik.



3

Bedien met je ene hand de afstandsbediening. Met je andere hand ondersteun je het hoofd van de cliënt. Laat de tilstoel omhoogkomen. Houd de cliënt continu in de gaten. Stop eventueel even tussendoor zodat de cliënt wat kan wennen.

Maak de veiligheidsriem los en help, als dat kan en nodig is, de cliënt tot stand. Eventueel gebruik je nu een hulpmiddel zoals het opstalooptrek, actieve- of passieve tillift. Neem de tijd en houd de cliënt goed in de gaten.

Na afloop laat je de tilstoel zakken naar een horizontale positie. Trek de vier poten en de beide rugsteunen uit de zitting en stop de tilstoel met de afstandsbediening weer terug in de tas.

