



Obese cliënt draaien in bed met behulp van plafondlift



1


Je kunt obese cliënten helpen draaien in bed met een plafondlift. De cliënt ligt dan op een speciale tilband ('permanent laken'). Deze tilband heeft een aantal lussen waarmee de tilband aan het juk van de plafondlift bevestigd kan worden. De lussen kunnen in verschillende standen aan het juk worden bevestigd zodat je de druk goed kunt verdelen. Denk er aan dat deze drukverdeling, onder andere afhankelijk van het lichaamstype (appel, peer), verschilt per cliënt.

Zet tijdens de draai het beddek omhoog om vallen te voorkomen. Zorg voor voldoende ruimte voor de cliënt om te draaien, zodat hij niet klem komt te liggen tegen het beddek. Leg het kussen alvast in de richting van de transfer.



2

Trek met de plafondlift de tilband eerst een beetje strak en controleer of alles goed gaat. Activeer nu de plafondlift tot de cliënt is gedraaid. Let goed op dat de cliënt niet op de eigen arm gedraaid wordt en begeleid de benen zodat ze comfortabel terecht komen.

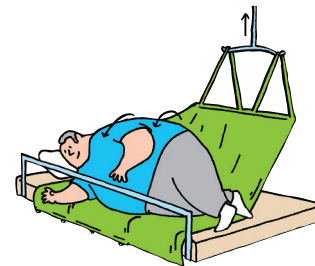

3

Check of de cliënt goed ligt en koppel de tilband los van de plafondlift. De tilband is een 'permanent laken', je kunt 'm dus na gebruik laten liggen, waardoor hij weer klaar is voor de volgende keer. Blijf tijdens de hele handeling contact houden met de cliënt. Obese mensen kunnen snel onwel, duizelig of benauwd raken tijdens een transfer.

Voorkom dat er na afloop restspanning of druk blijft bestaan bij de cliënt. Wiebel heen en weer of til arm of been even lichtjes op en vergroot het contactoppervlak.



TIP Een plafondtillift kan ook helpen bij wondzorg, ook bij een zwaar been.

