





Verschon en toiletgang met de tillift: met sta-lift en met een passieve tillift en Flexjuk



Het verschonen in een tillift kan in een sta-lift, maar ook met een speciaal juk (Flexjuk) en band in een passieve tillift. Soms kan er dan ook nog toiletgang geboden worden. De buikbandverbanden zijn daarvoor het handigst. Die sluiten in principe aan de voorzijde, maar het kan zeker bij een actieve tillift handiger zijn ze achterstevoren te gebruiken. Voor de absorptiecapaciteit maakt dat niet uit.

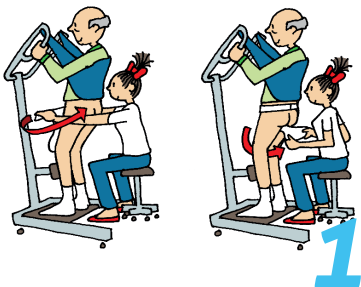

Gebruik voor jouw houding liefst een verrijdbaar krukje. Vouw tevoren het verband altijd in een plasgoot. Bevestig vervolgens het verband aan de buikband.

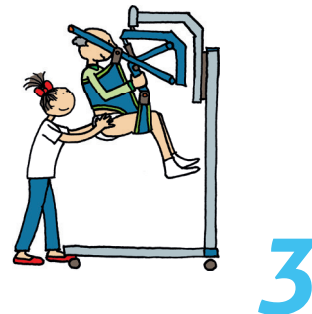

Met speciale toilet-tilbanden, maar zeker met een Flexjuk en bijbehorende tilband kan je ook in een passieve tillift verschoning en toiletgang bieden. Dit speciale juk biedt unieke mogelijkheden. De tilband gaat daarbij binnendoor langs de benen. De beenslips gaan dus van binnen naar buiten en worden dan aan speciale ophangpunten bevestigd. Daardoor is er meer ruimte bij het onderlichaam van de cliënt om de broek uit en aan te doen, op hoogte te verschonen en is toiletgang soms mogelijk. Voel vooral zelf een keer hoe dat voelt.

Controleer bij alle systemen altijd na afloop of het verband nergens dubbel zit en in de liezen goed aansluit. Vraag dat ook aan de cliënt.