



Douchen met weinig water op bed

1

Dit systeem is een soort mini douche waarmee je, met water en speciale zeep, een cliënt op bed kunt douchen. Met de knop op het handstuk doseer je de sproeier. Als je het handstuk loslaat stopt het apparaat met het douchen. De temperatuur van het water stel je in door de sproeier dichterbij of juist verder weg te houden van de huid van de cliënt.

Leg een handdoek over het hele matras om te voorkomen dat het matras en de (hoes)lakens vochtig worden.



2

Douche het te verzorgen lichaamsdeel. Met uitzondering van het gezicht, doe dat met een gewone washand. Dep de gedouchte huid zachtjes af met een droge handdoek. Je hoeft niet te boenen of te wrijven. Als de cliënt helemaal droog is, haal je handdoek weg. Bijvoorbeeld door licht te kantelen.

3

Na gebruik laat je het systeem aan staan en open je de deksel van de container. Klik de aansluiting los van de container en laat het water uit de slang in de container lopen. Als er geen water meer uit de slang komt, kun je het apparaat uitschakelen. Rol de slang op, zet deze in de bak en leeg vervolgens de container. Spoel de container na en droog hem af. Maak de slang en de sproeier schoon met een desinfectiedoekje.



TIP Overweeg ook moeilijk bereikbare plaatsen te douchen met weinig water op bed. Denk aan onder de nagels, tussen de vingers, tenen en intieme delen. En achtergebleven faeces of urine.